

Mesa Incisal

Metálica Ajustável



 **bio·art**
soluções inteligentes

CE

MANUAL DO USUÁRIO

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1-Introdução..... | 01 |
| 2-Conteúdo da embalagem..... | 01 |
| 3-Instalação..... | 01 |
| 4-Instruções de uso..... | 01 |
| 5-Problemas e soluções..... | 02 |
| 6-Manutenção e limpeza..... | 02 |
| 7-Especificações técnicas..... | 02 |
| 8-Simbologia..... | 03 |
| 9-Termo de garantia e assistência técnica..... | 03 |
| 10-Assistência técnica autorizada..... | 04 |
| 11-Representante autorizado na Europa..... | 04 |

1 Introdução

Obrigado por escolher um produto da Bio-Art. A Mesa Incisal metálica ajustável foi desenvolvida pela Bio-Art para ser utilizada em seus articuladores em trabalhos específicos com a técnica preconizada por cada profissional. É construída em alumínio injetado e superficialmente niquelada, garantindo proteção contra oxidações e robustez. Em caso de qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo, o usuário e/ou paciente deve comunicar a Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda e à autoridade competente de seus país.

2 Conteúdo da Embalagem

01 Mesa Incisal metálica ajustável com manipululo de fixação


01 Chave Allen 2.5mm e manual de instruções.



Manipulo de Fixação

3 Instalação

Retire a Mesa Incisal padrão (acrílica) do articulador e instale no mesmo local a Mesa Incisal Metálica Ajustável conforme figuras abaixo.

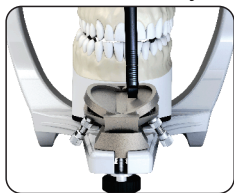

4 Instruções de Uso

A Mesa Incisal Ajustável é utilizada no articulador para os trabalhos do processo de “balanceamento dos dentes”, permitindo a personalização da guia anterior através de suas paredes laterais e plano antero-posterior ajustáveis.



Nota: Este manual contém somente as informações básicas e simplificadas com relação ao produto, as quais não substituem o devido curso e treinamento. A Mesa Incisal Ajustável constitui um produto destinado ao uso somente por profissionais especialmente qualificados na área ficando estes totalmente responsáveis pela técnica utilizada.

5 Problemas e Soluções

| PROBLEMAS | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|--|
| Instabilidades na fixação da Mesa Incisal metálica no Articulador. | Resíduos ou sujeira no ramo inferior ou na face de apoio da Mesa. | Antes de fixar a Mesa, limpe sempre sua face de apoio e o ramo inferior do Articulador. |
| Dificuldades de movimentos das partes móveis da Mesa Incisal ajustável. | Parafusos danificados ou acúmulo de resíduos nas partes móveis. | Mantenha as partes móveis sempre limpas. Substitua os parafusos danificados, entre em contato com a rede de Assistência Técnica Autorizada Bio-Art. |

6 Manutenção e Limpeza

1. Para a limpeza utilize um pincel macio e um pano limpo umedecido em álcool 70%, não use solventes, detergentes ou produtos químicos;
2. Não utilize objetos metálicos ou cortantes para a limpeza de qualquer parte, caso seja necessário utilize apenas espátula plástica;
3. Não deixe a Mesa Incisal Ajustável exposta em temperaturas elevadas ou umidade excessiva.
4. Para qualquer manutenção utilize sempre a Rede de Assistência Técnica autorizada Bio-Art.

7 Especificações Técnicas

Principais materiais utilizados na fabricação da Mesa Incisal Metálica Ajustável:

Conjunto da Mesa: alumínio com acabamentos superficiais anodizado, molas de aço carbono;

Manipulo de fixação: Manipulo de PA injetado em inserto de latão;
Movimentos das mandíbulas laterais: Máximo 40°;
Movimento do giro sobre a mesa: 0 a 10° 0 a 30°;

Peso: 50 gramas.

8 Simbologia

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <i>Consultar Instruções para Uso</i> |  <i>Atenção!</i> |  <i>Número de Série</i> |  <i>Código do Modelo</i> |
|  <i>Representante Autorizado na Comunidade Europeia</i> |  <i>Data de Fabricação</i> |  <i>Dados do Fabricante</i> |  <i>Manter em local seco</i> |
|  <i>Este lado para cima</i> |  <i>Frágil</i> |  <i>Empilhamento Máximo</i> |  <i>Equipamento Médico</i> |

9 Termos de garantia e assist. técnica

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da respectiva Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número serial do produto;
- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

Limitações da garantia:

- Desgaste natural de peças;
- Mau-uso, quedas ou sinistros;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;



Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará

CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502

CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

www.bioart.com.br

IO Assistência Técnica Autorizada

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site:

www.bioart.com.br

II Representante Aut. na Europa

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net





**Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos**
