

# Placa de Montagem Trilho

---



 **bio·art**  
soluções inteligentes

CE

---

# MANUAL DO USUÁRIO



## ÍNDICE

- 1-Introdução
- 2-Conteúdo da embalagem
- 3-Instruções de uso
- 4-Problemas e soluções
- 5-Manutenção e limpeza
- 6-Especificações técnicas
- 7-Precauções de segurança
- 8-Condições especiais de armazenamento
- 9-Simbologia
- 10-Termos de garantia e assistência técnica
- 11-Assistência Técnica autorizada
- 12-Representação autorizada na Europa



## 1 - INTRODUÇÃO



**Antes de utilizar a Placa de montagem trilho, leia atentamente todas as informações contidas neste manual de instruções.**

A Placa de Montagem Trilho Bio-Art foi desenvolvida especialmente para possibilitar a remoção do modelo de gesso sem a necessidade de quebrá-lo, o que acontece com a maioria das placas de montagem convencionais. Em caso de qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo, o usuário e/ou paciente deve comunicar a Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda e à autoridade competente de seus país.

## 2 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1-Uma placa de montagem trilho;
- 1-Manual de instruções.

## 3 - INSTRUÇÕES DE USO

A Placa de montagem trilho foi desenvolvida para ser instalada sobre a base do ramo inferior ou superior do articulador. Sua fixação é feita através de ímã encaixando-a nos pinos dos ramos.

A Placa de Montagem Trilho permite com facilidade a montagem e a remoção dos modelos sem a destruição do gesso utilizado na transferência do registro.





Para um funcionamento adequado, deve-se tomar alguns cuidados na montagem e retirada do modelo, conforme procedimento:

- 1) Durante a montagem, coloque gesso preenchendo todo o espaço interno formado entre as paredes retentivas (A) e a base do design trilho, garantindo uma melhor retenção do modelo;
- 2) O acabamento do modelo na borda lateral da placa de montagem, deverá ficar isenta de gesso em toda sua extensão, para garantir seu destacamento e deslizamento durante a retirada;
- 3) Antes da retirada do modelo, deve-se remover o gesso contido no canal retentivo (B) da placa utilizando ferramenta pontiaguda (ex.: Lecron). Este orifício de retenção tem a função de evitar que o modelo saia espontaneamente da placa de montagem durante o trabalho com articulador;
- 4) Depois de retirado todo o gesso contido no orifício de retenção, deve-se segurar firmemente o modelo e aplicar uma pequena batida na borda da placa obedecendo o sentido indicado pelas setas localizadas na face inferior da placa. Esta operação fará com que a placa se destaque do gesso e fique livre para que possa deslizar facilmente para fora do modelo.

**Obs.:** Uma vez retirado o modelo da placa de montagem trilho, não garantimos a sua recolocação com a mesma precisão da posição inicial de trabalho, já que esta depende totalmente da qualidade técnica do trabalho bem como da qualidade dos materiais utilizados no processo (gesso).

### **Atenção!**



***Os procedimentos relacionados à instalação e montagem dos modelos no articulador, bem como o manuseio do mesmo, são exclusivos da técnica utilizada pelo profissional. Qualquer problema ou falha técnica proveniente do uso incorreto ou instalação indevida do equipamento é de total responsabilidade do profissional.***



## 4 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Placa de montagem trilho com força de fixação fraca.	Acúmulo de resíduos entre as faces de contato de fixação.	Limpe as faces de contato entre a placa corretamente.
Dificuldade de retirar o modelo da Placa.	Placa com imperfeições ou deformações	A Placa deformada deve ser substituída.
	Qualidade do gesso	Use sempre gesso de qualidade comprovada.

## 5 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A Placa de montagem trilho, devem ser lavadas exclusivamente com água e detergente neutro e sempre mantenha o produto completamente seco. Para a limpeza, nunca utilize solventes ou espátulas metálicas.

## 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material:

Placa injetada: PA6 + 30 % fibra de vidro.

Inserto metálico: Aço Inox SAE-420.

Peso da Placa injetada com inserto: 22 gramas, ( $\pm 10\%$ ).

## 7 - PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA













Este manual contém somente as informações básicas e simplificadas com relação ao produto, as quais não substituem o devido curso e treinamento. A Placa de montagem trilho constitui um produto destinado ao uso somente por profissionais especialmente qualificados na área, ficando estes totalmente responsáveis pela técnica utilizada.



## 8 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

Quando não utilizadas, guarde as Placas de montagem trilha em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar direta.

## 9 - SIMBOLOGIA

 <p><i>Consultar Instruções para Uso</i></p>	 <p><i>Número de Série</i></p>	 <p><i>Código do Modelo</i></p>	 <p><i>Representante Autorizado na Comunidade Européia</i></p>
 <p><i>Data de Fabricação</i></p>	 <p><i>Dados do Fabricante</i></p>	 <p><i>Atenção!</i></p>	 <p><i>Manter em local seco</i></p>
 <p><i>Este lado para cima</i></p>	 <p><i>Frágil</i></p>	 <p><i>Empilhamento Máximo</i></p>	 <p><i>Equipamento Médico</i></p>

## 10 - TERMOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da fatura de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do



defeito e número serial do produto;

- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

#### **Limitações da garantia:**

- Desgaste natural de peças;
- Mau-uso, quedas ou sinistros;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;

#### **Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:**

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Teotônio Vilela, 120 – Jardim Tangará

CEP 13568-000 – São Carlos – SP – Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502 – Fax +55 (16) 3372-5953

CNPJ 58.538.372/0001-56 – Insc. Estadual 637.034.447.113

[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)

## **11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA**

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site: [www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)

## **12 - REPRESENTANTE AUTORIZADO NA EUROPA**

**Obelis s.a.**

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)





Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000  
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502  
[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br) - [@bioart\\_solucoes\\_inteligentes](https://www.instagram.com/bioart_solucoes_inteligentes)