

Moldeira

O D O N T O L Ó G I C A



**Manual de
Instruções Técnicas**



1. Introdução.....	2
2. Especificações técnicas.....	2
3. Conteúdo da embalagem.....	2
4. Instruções de uso.....	5
5. Precauções de segurança.....	6
6. Manutenção e limpeza.....	6
7. Condições especiais de armazenamento.....	7
8. Simbologia.....	7
9. Termo de garantia.....	7

▶ 1 - INTRODUÇÃO

As moldeiras Bio-Art foram desenvolvidas para utilização exclusiva de profissionais da área odontológica com objetivo de realizar moldagens das arcadas dentárias e/ou rebordo alveolares do paciente, através de diferentes materiais de impressão odontológicos (ex. alginato, silicones de condensação ou adição, entre outros). Com o molde é produzido modelos de gesso que serão utilizados como replicas dessas estruturas anatômicas do paciente em laboratório.



Atenção! Leia atentamente todas as informações contidas neste Manual de Instruções antes de começar a utilizar o produto.

▶ 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Aço Inoxidável AISI 304

▶ 3 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Moldeira Total Lisa Superior Infantil P (S)
- Moldeira Total Lisa Superior Infantil M (M)
- Moldeira Total Lisa Superior Infantil G (L)
- Moldeira Total Lisa Inferior Infantil P (S)
- Moldeira Total Lisa Inferior Infantil M (M)
- Moldeira Total Lisa Inferior Infantil G (L)

- Moldeira Total Perfurada Superior Infantil P (S)
- Moldeira Total Perfurada Superior Infantil M (M)
- Moldeira Total Perfurada Superior Infantil G (L)
- Moldeira Total Perfurada Inferior Infantil P (S)
- Moldeira Total Perfurada Inferior Infantil M (M)
- Moldeira Total Perfurada Inferior Infantil G (L)

Moldeira Total Lisa Superior Adulto P (S)
Moldeira Total Lisa Superior Adulto M (M)
Moldeira Total Lisa Superior Adulto G (L)
Moldeira Total Lisa Superior Adulto XG (XL)
Moldeira Total Lisa Inferior Adulto P (S)
Moldeira Total Lisa Inferior Adulto M (M)
Moldeira Total Lisa Inferior Adulto G (L)
Moldeira Total Lisa Inferior Adulto XG (XL)

Moldeira Total Perfurada Superior Adulto P (S)
Moldeira Total Perfurada Superior Adulto M (M)
Moldeira Total Perfurada Superior Adulto G (L)
Moldeira Total Perfurada Superior Adulto XG (XL)
Moldeira Total Perfurada Inferior Adulto P (S)
Moldeira Total Perfurada Inferior Adulto M (M)
Moldeira Total Perfurada Inferior Adulto G (L)
Moldeira Total Perfurada Inferior Adulto XG (XL)

Moldeira Total Lisa Desdentado Superior Adulto P (S)
Moldeira Total Lisa Desdentado Superior Adulto M (M)
Moldeira Total Lisa Desdentado Superior Adulto G (L)
Moldeira Total Lisa Desdentado Inferior Adulto P (S)
Moldeira Total Lisa Desdentado Inferior Adulto M (M)
Moldeira Total Lisa Desdentado Inferior Adulto G (L)

Moldeira Total Perfurada Desdentado Superior Adulto P (S)
Moldeira Total Perfurada Desdentado Superior Adulto M (M)
Moldeira Total Perfurada Desdentado Superior Adulto G (L)
Moldeira Total Perfurada Desdentado Inferior Adulto P (S)
Moldeira Total Perfurada Desdentado Inferior Adulto M (M)
Moldeira Total Perfurada Desdentado Inferior Adulto G (L)

Moldeira Lisa Lateral SD / IE P (S)
Moldeira Lisa Lateral SD / IE M (M)
Moldeira Lisa Lateral SD / IE G (L)
Moldeira Lisa Lateral SE / ID P (S)
Moldeira Lisa Lateral SE / ID M (M)
Moldeira Lisa Lateral SE / ID G (L)
Moldeira Lisa Anterior Superior (UP)
Moldeira Lisa Anterior Inferior (LW)

Moldeira Perfurada Lateral SD / IE P (S)
Moldeira Perfurada Lateral SD / IE M (M)
Moldeira Perfurada Lateral SD / IE G (L)
Moldeira Perfurada Lateral SE / ID P (S)
Moldeira Perfurada Lateral SE / ID M (M)
Moldeira Perfurada Lateral SE / ID G (L)
Moldeira Perfurada Anterior Superior (UP)
Moldeira Frontal Anterior Inferior (LW)

Identificação do Tamanho	Descrição
S	Pequena
M	Média
L	Grande
XL	Extra Grande
UP	Superior
LW	Inferior
SD / IE	Superior Direita / Inferior Esquerda
SE / ID	Superior Esquerda / Inferior Direita

**Produto fornecido em embalagem individual,
com 6 ou 8 unid. em blister plástico.**



► 4 - INSTRUÇÕES DE USO ◀

Selecione o tamanho da moldeira de acordo com a arcada e/ou rebordo alveolar a ser moldado:

- Prepare o material de moldagem desejado conforme especificações do fabricante e coloque na parte interna da moldeira;
- Leve a moldeira com o material de moldagem em posição na arcada do paciente;
- Pressione a moldeira levemente contra arcada e/ou rebordo do paciente;
- Aguarde até a presa do material conforme especificado pelo fabricante e em seguida retire o molde;
- Vaze o gesso no molde para confeccionar o modelo odontológico.

5 - PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS.



- *As moldeiras Bio-Art são instrumentos de uso exclusivo para confecção de moldagem da arcada dentária e/ou rebordo alveolar do ser humano e para uso exclusivo odontológico.*
- *Força mecânica excessiva pode causar ferimentos e/ou desconfortos ao paciente, desta forma, o manuseio deve ser leve e cuidadoso.*
- *As moldeiras devem ser utilizadas apenas por profissionais qualificados.*
- *Antes de um procedimento de moldagem a moldeira deverá ser esterilizada.*

CONTRA-INDICAÇÕES

- *O produto não apresenta contraindicações quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo suas instruções de uso.*

6 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Para a lavagem da moldeira recomenda-se água destilada, deionizada ou desmineralizada. Se a água estiver aquecida, para facilitar esta etapa da limpeza, esta temperatura deverá estar entre 40°C e 45°C;
- Utilizar sabão neutro a 1 ou detergente neutro, ambos com pH 7,0;
- Em casos da utilização de escovas que sejam macias com cerdas naturais ou de nylon;
- Não acumular em grande quantidade, uns sobre os outros, para impedir a deformação das peças e assim também não riscar as superfícies. Manusear sempre poucas peças por vez;
- Nunca utilizar para limpeza ou enxague soluções salinas, principalmente hipoclorito de sódio (água sanitária), soro fisiológico, desinfetantes, água oxigenada, ou álcool;
- Nunca deixar secar de “forma natural”. Utilizar sempre tecido macio e absorvente ou ar comprimido isento de umidade.

ESTERILIZAÇÃO: Embalar as moldeiras em papel grau cirúrgico e levar à autoclave de vapor a 121°C ou 134°C.





As moldeiras são de uso permanente, não estéril, portanto devem ser esterilizadas antes de cada utilização, seguindo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos. Após a utilização, o produto deverá ser lavado e secado imediatamente.

► 7 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

- Quando não utilizada, guarde a moldeira em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos, longe de fontes de calor excessivo e luz solar.
- O produto não necessita de cuidados especiais já que é um material de aço inox, devendo somente evitar atritos mais fortes para não alterar sua forma original e evitar quebras.

► 8 - SIMBOLOGIA

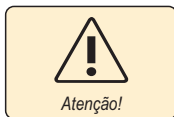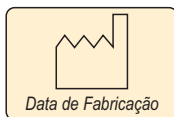

► 9 - TERMO DE GARANTIA

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., concede garantia de 6 (seis) meses à partir da data de compra, abrangendo todo e qualquer defeito de fabricação e será prestada mediante a substituição do produto e condicionada aos seguintes requisitos:

- a) Que o produto tenha sido transportado, armazenado e utilizado corretamente de acordo com as instruções fornecidas;
- b) Que a reclamação seja acompanhada da Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com a descrição do defeito e número de lote de fabricação;

Limitações da garantia:

- Desgaste natural;
- Defeitos decorrentes do uso ou armazenamento incorreto do produto;
- Transporte inadequado;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Danos por exposição a condições adversas (umidade, calor intenso, interação química, etc.);
- Limpeza e/ou desinfecção com produtos inadequados.

Para usufruir desta garantia no mercado nacional (Brasil), o consumidor deverá enviar o produto, por seus custos, para o endereço abaixo.



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará
CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953
CNPJ 58.538.372/0001-56 - I. E.: 637.034.447.113
www.bioart.com.br

Para demais países, a garantia é fornecida exclusivamente pelo distribuidor autorizado (importador legal).

As informações contidas neste manual estão sujeitas às mudanças que poderão ser realizadas sem prévio aviso.



Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará
CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos